

INNOWATECH Aolyte-B

Produktdatenblatt



ANWENDUNGSBEREICH

Flächendesinfektion

ANWENDUNGSBEREICH

INNOWATECH Aolyte-B ist ein schnellwirksames Desinfektionsmittel auf Wasserbasis für die Anwendung auf Oberflächen. INNOWATECH Aolyte-B ist alkoholfrei, aldehydfrei und parfümfrei.

ANWENDUNGSHINWEISE

INNOWATECH Aolyte-B ist eine gebrauchsfertige, flüssige, klare Lösung. Flächen und Gegenstände gleichmäßig und vollständig benetzen – (50ml/qm), ggf. mit Einmaltuch wischen und trocknen lassen. Ein Nachspülen mit Wasser ist nicht notwendig. Das Produkt verdunstet rückstandsfrei. Eventuell verbleibende Produktrückstände sind aus toxikologischer Sicht unbedenklich.

ANGABE ZUR WIRKSAMKEIT

INNOWATECH Aolyte-B ist unter dem Handelsname „Veriforte“ gemäß europäischen Standards nach EN 13697, EN 13704 und EN 14476 geprüft und DGHM/VAH sowie ÖGHMP gelistet. Es kann als Wischdesinfektionsmittel und als Sprühdesinfektionsmittel eingesetzt werden. Die angegebenen Einwirkzeiten gewährleisten die volle Wirksamkeit von INNOWATECH Aolyte-B / Veriforte gegenüber Bakterien, Viren, Sporen und Hefen, selbst dann, wenn auf ein mechanisches Nachhelfen mittels Einmaltuch verzichtet wird.

EINWIRKZEITEN unverdünnt – ohne mechanische Hilfe

Bakterizidie	vorgereinigte Oberfläche 5min*			
	MRSA	5 min	E.coli	1 min
	E.hirae	1 min	P.aeruginosa	1 min
Levurozidie	vorgereinigte Oberfläche			
	C.albicans	5 min		
	*kürzest mögliche Einwirkzeit gem. VAH – Verbund für Angewandte Hygiene			
Sporozidie	vorgereinigte Oberfläche			
	Bac. Subtilis	5 min		
Viruzidie				
	Murines NOROVirus	niedrige Belastung	1 min / hohe Belastung	1 min
	Adenovirus	niedrige Belastung	1 min / hohe Belastung	1 min
	Poliovirus	niedrige Belastung	1 min / hohe Belastung	30 min
begr. Viruzidie	inkl. HIV, HBV und HCV	5 min gem. Leitlinie DVV und RKI		

TECHNISCHE ANGABEN

Farbe/Form: farblos/flüssig; pH – Wert: 6,5 - 7,5

ZUSAMMENSETZUNG (w/w)

>99,0% Wasser; < 0,6% NaCl (Kochsalz); <0,2% HOCL (hypochlorige Säure); < 0,2% NaOCl (Natriumhypochlorit)

KENNZEICHNUNG nach GefStVo entfällt

Das Produkt ist kein Gefahrenstoff nach Gefahrenstoffverordnung. Die beim Umgang mit Chemikalien geltenden Vorsichtsmaßnahmen sollten jedoch beachtet werden. Chargennummer und Haltbarkeitsdatum als gesonderten Aufdruck auf der Verpackung beachten.

LAGERUNG

Behälter dicht geschlossen halten. Kühl und lichtgeschützt lagern.

ENTSORGUNG

INNOWATECH Anolyte-B kann unter ausreichender Verdünnung in die Kanalisation gegeben werden. Dabei sind die jeweiligen landesspezifischen Abfall- und Abwasservorschriften zu beachten. Kunststoffbehälter können nach Entleerung und ausspülen mit Wasser der Wertstoffsammlung zugeführt werden.

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Hersteller: INNOWATECH GmbH, Alte Kaserne 28, D-72186 Empfingen; Tel: +49 (0)7485/978747- 0
info@innowatech.de ; www.innowatech.de

Die Wirksamkeitsprüfungen wurden von der P.G.F Industry Solutions GmbH, A-5161 Elixhausen mit dem Produkt Veriforte durchgeführt. INNOWATECH Anolyte-B ist identisch mit Veriforte. Die Angaben in diesem Produktdatenblatt entsprechen dem heutigen Kenntnisstand. Sie sind das Ergebnis der bisherigen Erfahrungen und wissenschaftlichen Überprüfungen. Unterschiedliche Gegebenheiten im praktischen Anwendungsfall können jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Verarbeitung durch den Anwender ab. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Datenblatt besteht nur bei grobem Verschulden, Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit diesem Produktdatenblatt verlieren alle vorherigen Produktdatenblätter deren Gültigkeit.

Stand:03/ 2020